


# DISINFEZIONE DELLE MANI

Durata dell'intera operazione: **20-30 secondi**

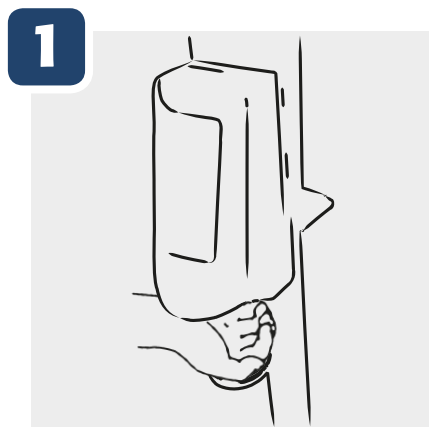

1  
Applicate il prodotto sul palmo delle mani.




2  
Frizionate i palmi gli uni contro gli altri con un movimento rotatorio.



3  
Frizionate il palmo destro sul dorso della mano sinistra intercalando le dita di una mano tra quelle dell'altra e viceversa.



4  
Frizionate i palmi gli uni contro gli altri intercalando le dita di una mano tra quelle dell'altra e viceversa.

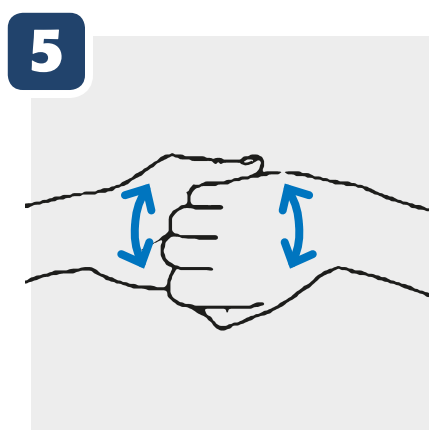

5  
Appoggiate la parte posteriore (esterna) delle dita sul palmo dell'altra mano mentre le dita si intrecciano.



6  
Stringete il pollice della mano sinistra all'interno della mano destra e ruotate la mano sinistra. Ripetete la stessa operazione con l'altra mano.



7  
Frizionate con le dita della mano destra sia il dorso che il palmo della mano sinistra con un movimento rotatorio. Ripetete la stessa operazione con l'altra mano.




8  
Una volta asciutte le vostre mani saranno disinfettate.




adapted from




# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PIANTANA

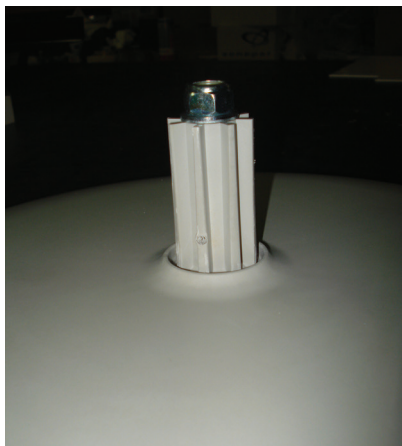

**1** Una volta aperto l'imballo, estrarre tutti i componenti ed iniziare la fase di assemblaggio, posizionando la base a terra.

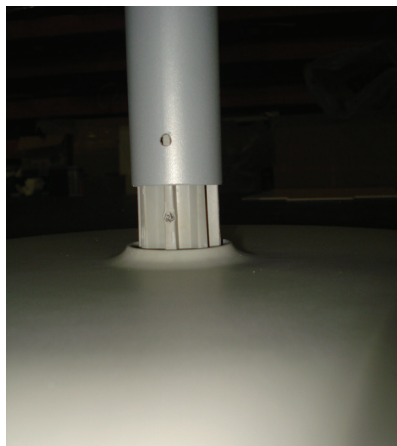

**2** Posizionare il tubo sul perno della base, in corrispondenza del foro di fissaggio, esercitando una pressione sul palo, fin quando i due fori non si trovano allineati.

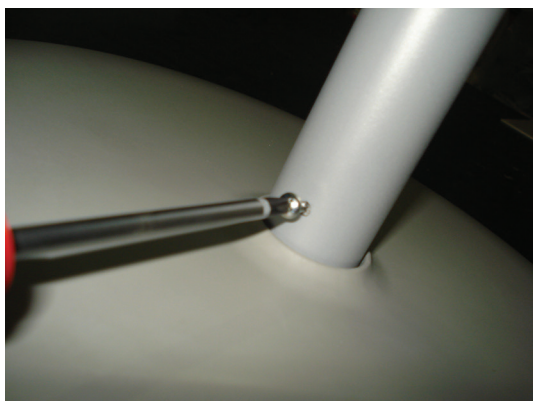


**3** Trovato l'allineamento, fissare con giravite la vite autofilettante, che si trova in dotazione nel sacchetto.




**4** Posizionato il crowner sul retro del supporto, fissare con apposita vite.

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NUOVO DISPENSER

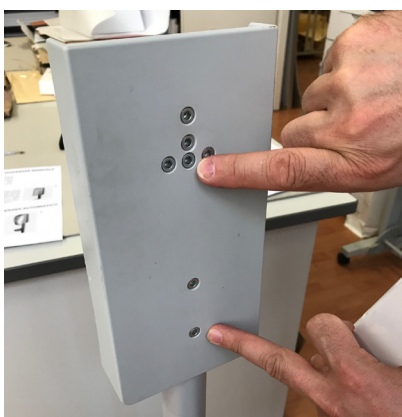

**1** Il posizionamento della placca del nuovo dispenser avverrà tramite la bussola in basso e quella centrale come indicato in figura

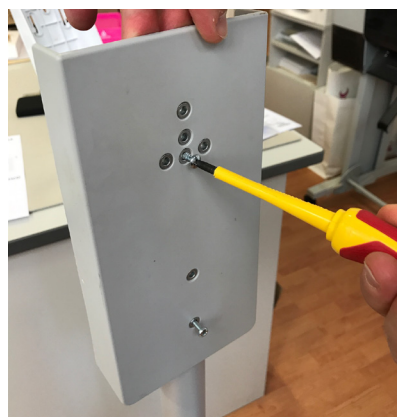

**2** Posizionare le 2 viti in dotazione (M4x16)




**3** Inserire la placca del dispenser e serrare con l'apposito giravite



**4** Dispenser installato

# POSIZIONAMENTO DISPENSER MANUALE

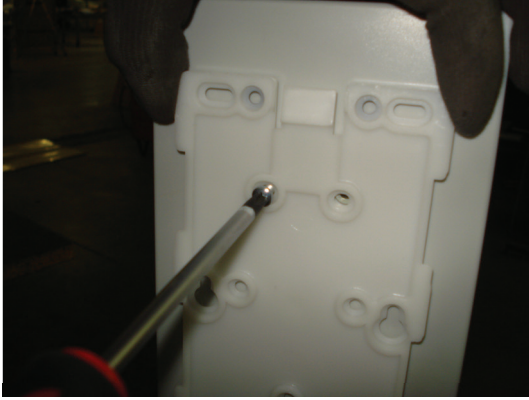

**1** Prendere la ghiera mobile del dispenser e fissarla nelle apposite bussole con viti da M 4x16.



**2** Posizionata la ghiera, prendere il dispenser ed inserirlo nelle apposite asole ad incastro, che con un semplice spostamento verso il basso andranno a bloccare il dispenser stesso, come indicato in figura 3.



**3**